


温冷水敷き패드 DQM-1A

運転停止後の取り扱いについて

このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品において、運転停止後に長時間放置すると給水口フタの空気穴から水がにじみ出す場合があります。

（逆流防止弁にチリなどが噛み込んで、逆流防止弁の隙間から少しずつ水がにじみ出す場合がある）

使用後に運転を停止して放置する場合、チューブを本体からはずしてください。

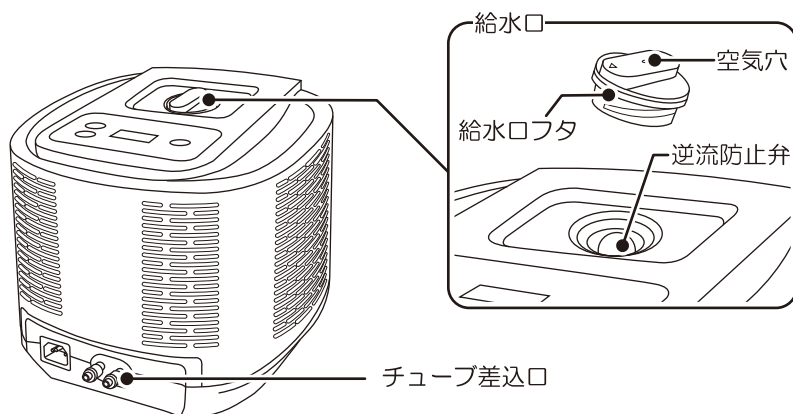

チューブのはずしかた

運転停止後、電源コードを抜き、リリースボタンを押しながらチューブを引き抜きます。
※チューブ先端とチューブ差込口から水がこぼれることがありますので、タオルなどを敷いてください。

